



## DISPOGEL

### GEL CALDO/FREDDO 14x24 CM

- Gelatina riutilizzabile caldo/freddo Dispo GEL
- Si tratta di un accumulatore riutilizzabile caldo/freddo da fonte esterna.
- Completamente atossico, adatta per uso medico e domestico: è modellabile, non indurisce diventando ghiaccio ed è riutilizzabile.
- La gelatina riutilizzabile caldo/freddo trova applicazioni in numerosi settori
- Terapia del freddo: conservare in freezer per almeno 2 ore. Estrarre dal freezer ed inserire in un panno e applicare sulla parte interessata
- Terapia del caldo: posizionare la busta nel forno a microonde per max 1 minuto regolandolo a 650 Watt o immergere la busta in acqua bollente per max 5 minuti, estrarre e asciugare; in entrambi i casi inserire la busta in un panno e applicare sulla parte interessata
- Dimensioni: 14x24 cm circa

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl