



02MFSE00-1

MASCHERINA IN TNT CON VISIERA

- Mascherina monouso in TNT a quattro strati con visiera antiappannante, stringinaso conformabile
- Con elastici auricolari, colore verde
- Destinazione d'uso: mantenimento delle condizioni igieniche tra utilizzatore-paziente-ambiente
- Realizzata in TNT (tessuto non tessuto) è priva di cuciture
- La mascherina è atossica, anallergica e inodore e offre una bassissima resistenza alla respirazione
- Ha un'elevata capacità di filtraggio e non contiene fibre di vetro, nichel o altre sostanze dannose
- Priva di lattice
- Marcatura CE in conformità al regolamento europeo MDR 745
- Standard di riferimento e certificazione EN ISO 14683:2019 per maschere tipo IIR
- Bio-compatibilità in conformità alla ISO 10993-1
- Data di scadenza: 3 anni dalla data di produzione indicata sull'imballo
- Conservazione: in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore intens
- Maschera facciale monouso in tessuto non tessuto a quattro strati, con visiera anti-appannamento e clip per il naso adattabile.
- Con fascia elastica, colore verde
- Uso previsto: mantenimento delle condizioni igieniche tra l'ambiente dell'utente e quello del paziente.
- Realizzato in TNT (tessuto non tessuto) senza cuciture
- La maschera è atossica, ipoallergenica e inodore e offre una resistenza respiratoria molto bassa.
- Ha un'elevata capacità di filtraggio e non contiene fibre di vetro, nichel o altre sostanze nocive.
- Senza lattice
- Marchio CE secondo la normativa europea MDR 2017/745
- Norma di riferimento e certificazione EN ISO 14683:2019 per le maschere di tipo IIR
- Biocompatibilità secondo ISO 10993-1
- Data di scadenza: 3 anni dalla data di produzione indicata sulla confezione.
- Conservazione: in un luogo fresco e asciutto, lontano da forti fonti di calore.

Indicazioni d'uso:

Indossare la maschera con le mani pulite e asciutte, con il lato con la visiera rivolto verso l'alto e la superficie di appoggio rivolta verso l'esterno. Quindi srotolare le pieghe e modellare la maschera in modo che la maschera aderisca il più

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl



possibile, assicurandosi che la bocca e il naso siano adeguatamente coperti. Sostituire la maschera se è danneggiata, sporca o bagnata, o in base alle normative locali; non toccare la parte filtrante della maschera dopo l'uso e lavarsi le mani dopo averla rimossa.

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl